

Hydrocoll®

輕薄服貼 加倍吸收 透膚美觀 簡單清爽



產品規格

赫曼涵特人工皮 (滅菌)

產品型號	產品規格
900942	薄 10 X 10 cm
900943	薄 15 X 15 cm
900938	厚 10 X 10 cm
900939	厚 15 X 15 cm



(請諮詢您的醫師關於本產品的使用方式)

常見問題

● 何時需要更換 Hydrocoll®?

Hydrocoll® 已吸收滲液的範圍，接近敷料邊緣時即可更換。

● 何時適合開始使用 Hydrocoll®?

在低至中度滲液情況且無感染的傷口均可以使用。

● 該如何存放 Hydrocoll®?

單次未使用完的 Hydrocoll®，可放回原包裝，並將袋口向下反摺以紙膠帶封合。建議盡快使用完畢。

● Hydrocoll® 可以搭配其他敷料使用嗎?

人工皮服貼性佳，且功能明確，不建議搭配其他敷料使用。

台灣赫曼有限公司

臺北市內湖區石潭路67號7樓

消費者服務專線：02-2790-7992分機13

使用前請詳閱說明書書語及注意事項

北市衛器廣字第 110070040 號


衛部醫器輸壹字第 021683 號

PHTW_WM_HYDR_210514_01

線上
醫護



幫您解決傷口
照護困擾!

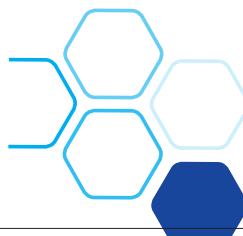

醫美推薦

兼顧照護與美觀



不怕色差
保持美麗



Hydrocoll®

赫曼涵特人工皮 (滅菌)

輕薄服貼 加倍吸收 透膚美觀 簡單清爽

HARTMANN



赫曼涵特人工皮 (滅菌)

Hydrocoll®

輕薄服貼 加倍吸收 透膚美觀 簡單清爽



透膚美觀
便利觀察傷口



加速癒合
吸收量極佳



低殘膠
不易造成
疼痛的換藥





輕薄服貼
極佳的保護層



適用範圍

中低滲液、表淺傷口、擦傷、破皮、雷射傷口

使用方式

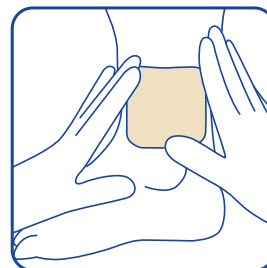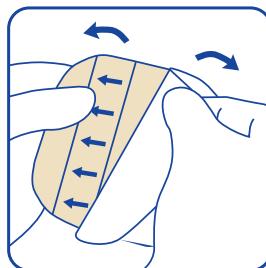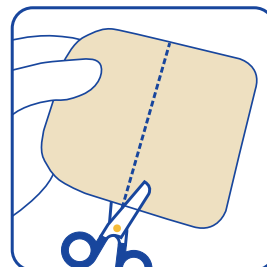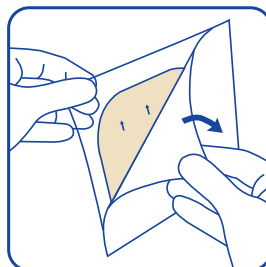

1. 將Hydrocoll®從包裝中取出
2. 依照傷口範圍裁剪合適的人工皮。
3. 將Hydrocoll®覆蓋於傷口。
4. 以手指輕壓人工皮，確保敷料服貼於傷口。

注意事項：

- 禁止使用在高感染風險或已感染傷口。
- 建議人工皮可剪裁大於傷口邊緣約2公分。
- 當滲液過多滲出敷料時，建議提早更換。
- 高滲液量或深度至肌肉層時，建議使用其他敷料替換。
- 請勿存放於攝氏30度以上，並遠離兒童存放。
- 如患者對本產品中任何一種成分過敏，請立即停止使用。

