

Peha-haft®

超高透氣 舒適低敏 簡單便利



產品規格

赫曼自黏透氣彈性繃帶 (未滅菌)

| 產品型號 | 產品規格 |
|--------|--------------|
| 932441 | 4 X 400 cm |
| 932442 | 6 X 400 cm |
| 932449 | 10 X 2000 cm |



(請諮詢您的醫師關於本產品的使用方式)

常見問題

● Peha-haft® 可以重複使用嗎？

如Peha-haft®未沾染滲液或直接接觸傷口，可重複使用。

● 如何選擇 Peha-haft® 的尺吋？

小範圍固定處建議選擇4cm X 4m或6cm X 4m；
關節處和軀幹則建議使用10cm X 20m。

● Peha-haft® 容易脫落嗎？

Peha-haft®將棉質與膠體編織而成，一體成形的設計，
增加Peha-haft®的服貼與穩固性，不易移位及脫落。

● Peha-haft® 和彈紗、彈繃有什麼差別呢？

Peha-haft®更加透氣舒適，且單圈纏繞即可固定，
無須另外固定勾，相對安全和便利。

台灣赫曼有限公司

臺北市內湖區石潭路67號7樓
消費者服務專線：02-2790-7992分機13

使用前請詳閱說明書書語及注意事項
北市衛器廣字第 110070043 號
衛部醫器輸壹字第 021044 號
PHTW_WM_PEHA_210514_01

線上
醫護



幫您解決傷口
照護困擾！



親膚透氣
舒適穩固



醫療級低敏
全肌膚適用



Peha-haft®

赫曼自黏透氣彈性繃帶 (未滅菌)

超高透氣 舒適低敏 簡單便利

HARTMANN



赫曼自黏透氣彈性繃帶 (未滅菌)

Peha-haft®

超高透氣 舒適低敏 簡單便利




舒適穩固
簡單便利




醫療級低敏
全肌安心適用



極透氣
不沾黏衣物

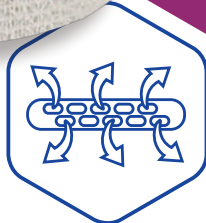

使用方式

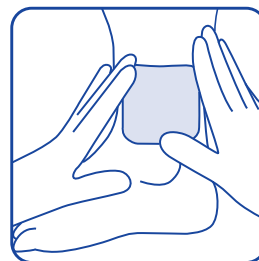

1. Peha-haft®從包裝取出。
2. 確定敷料及夾板的擺放位置。
3. 使用Peha-haft®從遠心段纏繞至近心端。
4. 取得適當長度，並裁切敷料。
5. 以手輕壓敷料，確保敷料可服貼傷口。

適用範圍

擦傷、骨折、術後傷口敷料等的固定、夾板固定、管路固定、肢體或關節困難固定處、配合加壓治療、皮膚脆弱不宜使用紙膠帶患者。

注意事項：

- 纏繞應避免過緊，造成末梢循環不良。
- 若Peha-haft®沾染滲液，需提早更換，勿重複使用。
- 如患者對本產品中任何一種成分過敏，請立即停止使用。

