



品寶水凝膠傷口敷料

GreenGuard® Hydrogel Wound Dressing

以簡癒繁
傷口重塑如初

www.pingbao-biotech.com



保護傷口



保濕



滲透



簡單使用



有助癒合



安全低敏

經銷商

Hydrogel Wound Dressing



GreenGuard®

品寶水凝膠傷口敷料

產品成分

每單位(gm)包含：
Chlorine dioxide 1ppm、
Purified water (95%)、
PEG-400 (5%)

發明專利技術

高含水性
簡單使用

保護傷口
有助癒合

產品規格

10g: 104082
30g: 104083

動物試驗結果

安全性佳

通過 ISO10993 等多項生物相容性動物試驗，在皮膚敏感、皮下刺激及熱源試驗均無反應，以及不含動物性成分、酒精、藥物、抗生素、甲醛等成分，水凝膠經人體吸收後，可被排出。

高含水率 (95%)

具高含水率(95%)有助傷口癒合，並可大大降低傷口所引發之不適感。

滲透性佳

通過專利製程，材質具高滲透性，可滲透至皮下組織。

不沾黏

降低因傷口沾黏對新生組織的二次傷害，有助傷口癒合。

簡單使用

一劑到底，不分癒合進程，適用各種淺層或深層傷口。

使用範圍

- 一般外科患部傷口
- 適用於所有階段的傷口癒合（輕至中度的組織滲出液、

- ✓ 擦傷、刀傷、割傷
- ✓ 靜脈性潰瘍傷口
- ✓ 糖尿病足傷口
- ✓ 褥瘡傷口
- ✓ 手術傷口
- ✓ 燒燙傷口
- ✓ 急性創傷
- ✓ 表面傷口
- ✓ 裂開傷口

敷料使用方法



若傷口周圍有毛髮，先修剪。以棉花棒配合生理食鹽水，清潔傷口表面的滲液。




02
傷口較深

若傷口較深，可直接將適量水凝膠直接擠至傷口上，以棉棒均勻塗抹；若傷口淺，則先將適量水凝膠擠在紗布上，直接塗抹傷口表面。



傷口較淺

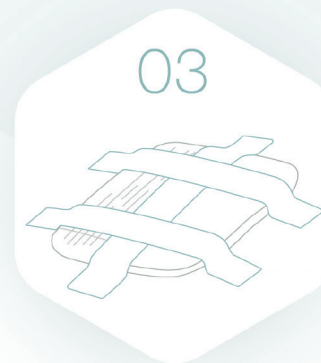

將該紗布蓋上傷口並固定。